

Eugenol



REF

804900 Eugenol 25 ml (vätska)

804909 Eugenol 10 ml (vätska)

AVSEDD ANVÄNDNING

Eugenol vätska är avsett att användas tillsammans med zinkoxid från samma tillverkare för framställning av ett zinkoxid-eugenol-baserat temporärt fyllningsmaterial vid endodontisk behandling mellan behandlingstillfällen. Produkten används endast av tandvårdspersonal.

INDIKATIONER

Produkten används som komponent i ett temporärt fyllningsmaterial för tätning av åtkomstkaviteter vid rotbehandling, förslutning mellan behandlingstillfällen samt som korttidsförslutning efter medicinläggning i rotkanalen.

ANVÄNDNINGSBEGRENSNINGAR

Produkten får inte användas fristående utan zinkoxid från samma tillverkare. Den är inte avsedd som fyllningsmaterial i sig och ska endast användas som komponent i en zinkoxid-eugenolblandning för temporär endodontisk förslutning. Blandningen ska inte användas som permanent fyllningsmaterial. Rekommenderad användningstid av blandningen är upp till 30 dagar beroende på klinisk situation.

KONTRAINDIKATIONER

Produkten ska inte användas hos patienter med känd överkänslighet mot zinkoxid eller eugenol. Fråga patient innan påbörjad behandling. Den får inte användas i direkt kontakt med exponerad pulpa och är inte avsedd för användning tillsammans med andra zinkoxid- eller resinbaserade system än den avsedda kombinationen från samma tillverkare. Produkten är inte avsedd för långtidsförslutning.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Endast för professionellt bruk. Eugenol kan orsaka irritation och allergiska reaktioner. Produkten ska endast användas i kombination med zinkoxid från samma tillverkare. Avvikande kombinationer kan påverka härdning, mekaniska egenskaper och klinisk prestanda. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämplig skyddsutrustning.

BIVERKNINGAR

Användning av blandningen zinkoxid-eugenol kan i vissa fall leda till lokal vävnadsirritation, allergiska reaktioner eller övergående postoperativ sensibilitet.

BRUKSANVISNING

Föberedelse

1. Avlägsna tillfälliga materialrester
2. Rengör kaviteten
3. Säkerställ torr arbetsmiljö (t.ex. kofferdam rekommenderas)
4. Använd rengjord eller steriliserad utrustning

Blandning

1. Dosera pulver (zinkoxid) och vätska (eugenol) (typiskt 4:1 för fyllningskonsistens)
2. Blanda på blandningsblock
3. Arbeta in pulvret stegvis
4. Blanda till en fast, icke-klibbig massa

Applicering

1. Applicera materialet i kaviteten med instrument, 3 – 5 mm
2. Anpassa ocklusion vid behov
3. Avlägsna överskott

Härdning

Initial härdning: ca 5–10 minuter

Fullständig härdning 16h (testad enligt ISO 3107)

Undvik belastning under initial härdning.

FÖRVARING

Eugenol förvaras torrt och väl tillsluten vid en temperatur mellan 15 och 25 °C och skyddas från ljus.

HÅLLBARHET

Ska inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Använd inte eugenol om den är mörkt gul och/eller har en svag doft (har normalt en stark doft).

KASSERING

Produkten och dess förpackning ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter för dentalt och kemiskt avfall.

Version / datum

V1-2026-06



Catalog No



Batch No.



Medical Device



Use By



Consult Instructions for Use



Manufacturer

Labservice AB
Södra Förmansvägen 7
863 41 Sundsvall
Tel: 060 52 59 70
info@labservice.se
www.labservice.se